

唾液收集步骤

- 1、收集唾液前不要进食或吸烟，并用清水漱口。
- 2、30 分钟后，打开“唾液收集储存瓶”瓶盖，将瓶盖放在安全无污染地方，并去掉瓶口的白色垫圈。
- 3、用手拿住唾液收集瓶，将唾液吐到瓶内，唾液就会随管壁流入到边管。
- 4、唾液量（不包含气泡）以与中管保存液的量相等为标准，旋紧瓶盖。
- 5、确定瓶盖旋紧后，上下翻转瓶体 10 -20 次，使唾液和保存液充分混合。
- 6、在标签上填写所需信息，如姓名，时间等。
- 7、整个唾液收集时间在 5-10 分钟内完成，不要超过 30 分钟，以免降低唾液 DNA 的质量。

武汉昌美生物公司的网站：www.wuhancharmbiotech.com

地址：武汉东湖高新区高新大道 666 号光谷生物城

电话：15308645422

QQ：2282048647

邮箱：charmbiotech_wh@163.com